


Specifiche del prodotto

Fisscure è un dispositivo meccanico ad azionamento manuale costituito da un tubo cilindrico a punta conica, dotato di un meccanismo di azione interno necessario per il rilascio di 4 aghi dalla superficie del cilindro perpendicolare all'asse longitudinale del dispositivo, separati da una distanza angolare di 90°. Il meccanismo viene azionato dal medico dalla parte terminale del dispositivo, dove si trova una manopola che può essere ruotata lungo l'asse del dispositivo, dotata di un pulsante di sicurezza per sbloccare o bloccare il meccanismo di azione interno.

Il cilindro esterno è dotato di linee di misurazione che consentono di inserire in sicurezza il dispositivo alla profondità necessaria per eseguire il trattamento nel punto giusto del canale anale.

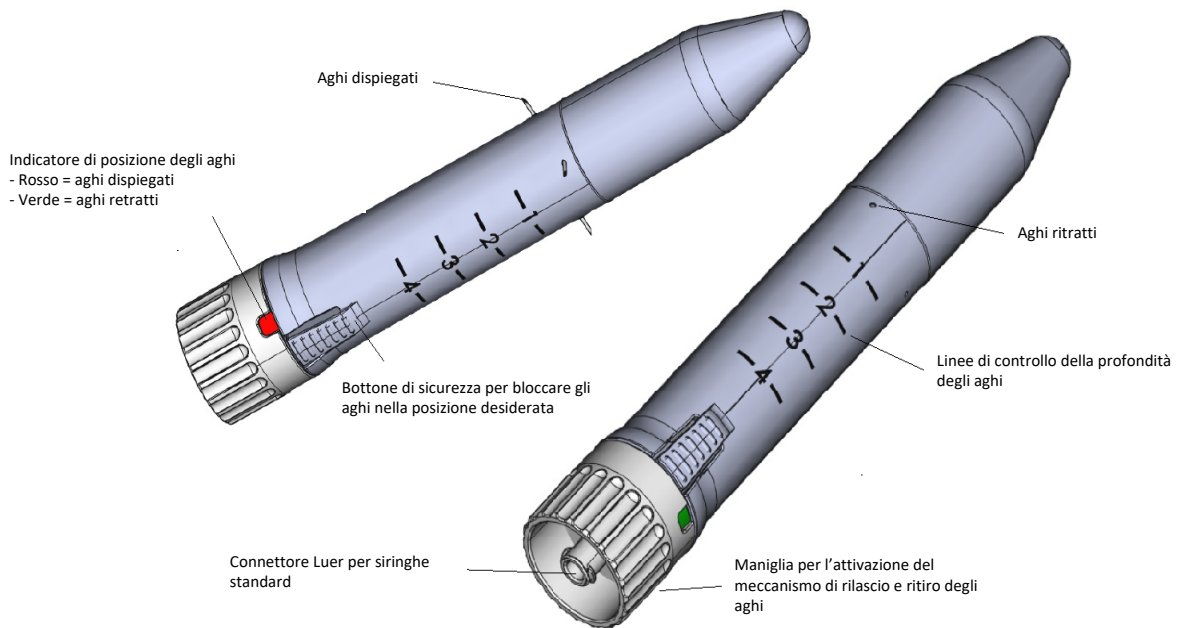

| Attributo | Descrizione |
|--|---|
| Lunghezza | 152 mm |
| Diametro del corpo | 22,5 mm |
| Diametro maniglia | 25,5 mm |
| Peso | 27,5 gr |
| Connettività della siringa | Luerlock standard |
| Materiali a contatto con il paziente | Miscela di polimeri ABS/PC (Bayblend M850 XF) colorata con Mevopur-Blue SB5M176382-ZA, acciaio inox AISI 304, PLT 34 - 165 (inchiostro nero sul mantello) |
| Materiali a contatto con il farmaco da applicare | TPE (Chemiton Med TMB0NA80.001), MABS (Terlux 2822HD), acciaio inox AISI 304 e Mevopur-Blue SB5M176382-ZA (colore maniglia) |
| Ago | Tipo di smusso: lancetta corta; materiale: AISI304; diametro interno: 0,40 mm; diametro esterno: 0,60 mm |
| Stato di sterilità | Dispositivo consegnato in condizioni di sterilità dopo la sterilizzazione a ossido di etilene |
| Imballaggio | Blister in PET sigillato con uno strato di Tyvek |